

Fred Easy Port



Výrobca: schiller

AED defibrilátor, ktorý je taký malý a ľahký, že sa zmestí do každého vrecka na kabáte a lekárskej brašny

S FRED® easyport® začína nová kapitola v histórii ranej defibrilácie. Jeho malá veľkosť a váha robia ideálneho spoločníka pre lekárov, stredných zdravotných pracovníkov, personál verejných služieb a iné osoby zaškolené na ranú defibriláciu.

Rizikovní pacienti nosia svoj vlastný záchranný prístroj, pričom oni a ich rodiny boli o tom poučení svojím lekárom. Toto dramaticky redukuje reakčný čas na ošetrovanie ventrikulárnej fibrilácie a tachykardií zaručujúc postihnutým oveľa väčšiu šancu na prežitie.

- Ľahký - iba 490 gramov (vrátane batérií)
- Malý-iba 133x126x35mm
- Vysoká rozlišovacia schopnosť LCD

Typ defibrilačného pulzu:

MULTIPULSE BIOWAVE® (patentované); Dvojfázový pulzový (prerušovaný) defibrilačný impulz s fixným trvaním prvej fázy 5ms aktívnej pre defibriláciu. Konštantná emitovaná energia nezávislá od patientskeho odporu.

Nastavenia energie (štandardné hodnoty):

- Dospelí: 120 - 120 - 120 J
- Deti (automatická premena pri zasunutých pediatrických elektródach): 15 - 30 - 50 J
- Zoznam konfigurovateľných hodnôt energie: 15- 30 - 50 - 70 - 90 - 120 J (dospelí) a 15 - 30 - 50 - 70 (deti)

Kontrola nabitia:

- Automatická, ak sa odporúča šok založený na analýze.
- Čas nabitia od prvého odporúčaného šoku po šok núdzový: < 10 s
- Čas cyklu šok - šok: < 20 s

Batéria (2ks)

- Typ: Li-MnO₂
- Kapacita: 60 šokov pri 120 J alebo 2 hodiny prevádzky (bez šoku).
- Použitelnosť: 5 rokov

Operačné prvky a displeje

- LCD obrazovka: 60 x 40 mm, vysoká rozlišovacia schopnosť, s podsvieteným LED pozadím, displej textu a EKG.
- Svetlá LED: Indikátor spojenia elektród pri káblovom vývode; indikátor núdzového režimu.
- Reprodukter: Slovné pokyny (kontrola hlasitosti cez nastavenie).

Výstraha:

Pípnutie v prípade chybového stavu prístroja.

OPCIA: Možnosť prepnutia prístroja do manuálneho režimu (bez analýzy rytmu)



© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia
Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911
E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201
EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991